


Anwendung

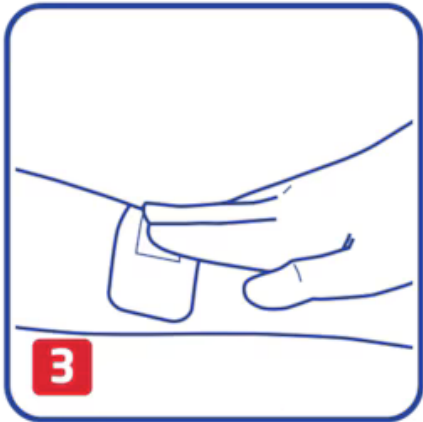

1.Entfernen Sie den Schutzfilm

Halten Sie das Pflaster in einer Hand und ziehen Sie mit dem Daumen und dem Zeigefinger der anderen den oberen Schutzfilm ab.

2.Platzieren Sie das Produkt und entfernen Sie den zweiten Schutzfilm

Platzieren Sie das Wundpad mittig auf die Wunde. Achten Sie darauf, das Pflaster ausschliesslich am Schutzfilm und auf der Rückseite zu berühren, niemals am Wundpad. Ziehen Sie den restlichen Schutzfilm ab.

3.Glätten Sie das Pflaster und drücken Sie es an

Glätten Sie den Wundverband, damit er gleichmässig haftet. Wenden Sie nur leichten Druck an und vermeiden Sie jegliche Spannung. Um die Haftung zu erhöhen, können Sie das Pflaster zwischen den Handflächen aufwärmen, bevor Sie es anwenden.